



## USER MANUAL

### Kugelwechsler

Version 0 – Last version date of the manual 04-11-2024

**Stiletto representative Federica Mascetti**  
via Macerata, 5 – 63100 – Ascoli Piceno (AP)  
P.IVA: 02363650447  
Tel: +39 345-056-3803

E-mail: [federica@mascetti.pro](mailto:federica@mascetti.pro) Website: [www.stilettosupply.net](http://www.stilettosupply.net)

Bei technischen Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter den oben angegebenen Adressen.

### Allgemeine Hinweise

Bevor Sie mit dem Produkt arbeiten, lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Stiletto erklärt, dass die Informationen in diesem Dokument mit den technischen und Sicherheitsstandards des Produkts übereinstimmen. Ein QR-Code, der zu diesem Sicherheitshandbuch führt, wird der Verpackung jedes Produkts beigelegt. Stiletto erkennt keine Dokumentation an, die nicht von Stiletto selbst oder einem autorisierten Vertreter erstellt, veröffentlicht oder vertrieben wurde. Dieses Handbuch wird für einen unbegrenzten Zeitraum online zugänglich sein und kann von jedermann eingesehen werden. Nach diesem Zeitraum liegt es in der Verantwortung derjenigen, die das Produkt verwalten, sicherzustellen, dass sowohl das Produkt als auch die Dokumentation den zum Zeitpunkt der Inspektion geltenden Gesetzen entsprechen.

### Warnungen

Dieses Handbuch beschreibt die allgemeinen Sicherheitsregeln, die bei der Bedienung des Kugelwechslers zu beachten sind. Die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Verfahren müssen sowohl in Bezug auf die angegebenen Ausführungsmethoden als auch auf die allgemeinen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Verschiedene Länder können unterschiedliche Sicherheitsvorschriften haben. Im Falle eines Konflikts zwischen den Regeln der Handbücher und den Regeln des Landes, in dem das Produkt verkauft wird, haben die Regeln des Landes Vorrang vor den Regeln der Handbücher.

- Überprüfen Sie nach Erhalt die Unversehrtheit des Produkts und seiner Verpackung, um sicherzustellen, dass es steril geblieben ist. Sollten Sie Schäden oder Spuren von Transportschäden feststellen, benachrichtigen Sie den Stiletto-Vertreter Federica Mascetti, bevor Sie mit den nachfolgenden Vorgängen fortfahren. VERWENDEN SIE NIEMALS BESCHÄDIGTE PRODUKTE.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung das Verfallsdatum des Produkts.
- Darf nicht in die Hände von Kindern und Tieren gelangen. Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden.

## Konformitätserklärung

Die gemäß der europäischen Gesetzgebung erstellte Konformitätserklärung ist ebenfalls im Lieferumfang dieses Produkts enthalten. HINWEIS: VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS IN JEDLICHER FORM DIE KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG PRÜFEN; BEI EINER WEITERVERÄUSSERUNG DES PRODUKTS MÜSSEN ALLE UNTERLAGEN MITGEGEBEN WERDEN.

## Produktbeschreibung

Der Kugelwechsler besteht aus zwei Teilen: einer Silikonspitze und einem biologisch abbaubaren Stiel. Die Spitze ist speziell geformt, um Gewindekugeln oder Pressfit-Kugeln in der Silikonspitze zu halten, damit der Piercer die Kugel oder den Stein leichter an das bereits in der Haut des Kunden platzierte Schmuckstück schrauben oder anbringen kann. Dieses Produkt ist einzeln verpackt und weder ein Spielzeug noch ein Medizinprodukt.

*Das Produkt ist für die Verwendung bei ästhetischen Behandlungen durch professionelle Piercer zum Zwecke des Piercings vorgesehen.*

## Technische Daten

Physikalische Eigenschaften	
Material:	
Sterilisationsmethode:	Ethylenoxid
Verpackung:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einzelner Kugelwechsler: Kraftpapierverpackung</li><li>• Karon:Karton</li></ul>
Sterilitätsgültigkeit der ungeöffneten Verpackung	5 Jahre. Das Verfallsdatum, bis zu dem das Produkt verwendet werden muss, ist auf der individuellen Papierverpackung jedes Produkts angegeben.
Abmessungen (cm)	8.5 x 5.5 x 10.5
Gewicht(oz)	4.8

## Restrisiken

Der Hersteller hat eine eingehende Risikoanalyse des Produkts durchgeführt. Aus dieser Analyse ergaben sich naturgemäß nicht zu eliminierende Risiken. Die Empfehlungen zur Vermeidung dieser Risiken werden in der vorliegenden Bedienungsanleitung hervorgehoben. Daher muss jeder, der das Produkt verwenden und warten muss, vorher die Bedienungsanleitung lesen.

- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, da sie für die korrekte und sichere Verwendung des Produkts erforderlich ist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung eines Produkts immer den Zustand der Verpackung und das Verfallsdatum.
- Weist das Produkt nach einem versehentlichen Stoß Verformungen auf, die auf eine mögliche Gefährdung und/oder Unbrauchbarkeit schließen lassen, ersetzen Sie das Produkt.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung durch professionelle Piercer zum Piercen bestimmt.
- Produkt-Updates werden unter folgendem Link veröffentlicht: [www.stilettoSupply.net](http://www.stilettoSupply.net)

## Lagerung

Überprüfen Sie vor der Lagerung des Produkts den Zustand der Verpackung auf Spuren von Stößen, Abrieb und/oder Verschmutzung, Rost, Schimmel usw., die durch falschen Transport und/oder falsche Lagerung verursacht worden sein können. Benachrichtigen Sie in diesem Fall den Hersteller.

- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum bei Raumtemperatur, fern von Hitze und Sonnenlicht.
- Das Produkt sollte in der Originalverpackung bleiben.

## Handhabung und Auspacken

Entnehmen Sie den Kugelwechsler vorsichtig aus der Verpackung, um sich nicht zu verletzen oder das Produkt zu beschädigen. Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den örtlichen Vorschriften. Das Produkt sollte erst unmittelbar vor der Verwendung aus der sterilen Verpackung entnommen werden.

## Verwendung



Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt, die als Piercer qualifiziert sind, und sollte von Kindern und Tieren ferngehalten werden. Das Produkt ist zum Einmalgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung vor der Verwendung beschädigt ist. **NIEMALS** über das Verfallsdatum hinaus verwenden.

### Anwendung:

1. Desinfizieren Sie Ihre Hände gründlich mit Wasser und Seife.
2. Tragen Sie Schutzhandschuhe, bevor Sie das Instrument und seine Verpackung anfassen.
3. Um den Kugelwechsler zu entnehmen, drücken Sie die Rückseite des Kugelwechslers aus der Papierseite der Verpackung heraus.
4. Halten Sie den Stiel fest in der Hand und setzen Sie die Kugel, den Edelstein oder den Ball ein, die für die ästhetische Behandlung verwendet werden.
5. Führen Sie es in das entsprechende Piercing ein.
6. Fahren Sie mit der ästhetischen Behandlung fort.

**DER HERSTELLER KANN IN KEINEM FALL FÜR UNFÄLLE ODER SCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄßE VERWENDUNG DES PRODUKTS ENTSTEHEN, EINSCHLIESSLICH DER TEILWEISEN NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSGESAMTREGELN UND EINGRIFFSPROZEDUREN, DIE IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBEN SIND.**

## Entsorgung

Die Verpackung und der Karton müssen gemäß den aktuellen Vorschriften, wie auf dem Umweltzeichen angegeben, getrennt entsorgt werden. Das Produkt muss gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Bioabfällen entsorgt werden.

## **Garantie**

Die im Kaufvertrag vollständig aufgeführten Garantiebestimmungen gelten nur, wenn das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Inkompetenz, fahrlässige Verwendung des Produkts oder schlechte Konservierung verursacht wurden.

**VERWENDUNG: DIE NICHTBEACHTUNG DER VERWENDUNGSWEISE DES PRODUKTS, DIE IN DIESER DOKUMENTATION BESCHRIEBEN IST, FÜHRT ZUM VERLUST DER GARANTIEBEDINGUNGEN.**

Die Produkte sind unter den folgenden Bedingungen garantiert:

1. Die Garantie gilt für einen Zeitraum von 12 oder 24 Monaten, abhängig von der Käuferkategorie.
2. Der Hersteller verpflichtet sich, fehlerhaft gefertigte Teile nach sorgfältiger Prüfung und Feststellung mangelhafter Konstruktion nach eigenem Ermessen zu ersetzen.
3. Der Käufer trägt immer die Transport- und/oder Versandkosten im Falle einer falschen Nutzung der Garantie.
4. Nur der ursprüngliche Käufer, der die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen für die normale Verwendung, Reinigung und Lagerung befolgt hat, kann von dieser Garantie profitieren. Unsere Gewährleistungsverpflichtung erlischt, wenn der ursprüngliche Eigentümer das Eigentum an dem Produkt abgibt oder wenn Modifikationen daran vorgenommen werden.
5. Die Garantie umfasst nicht Schäden, die durch übermäßige Belastung, wie z. B. die Verwendung des Produkts nach Feststellung einer Anomalie, die Verwendung unangemessener Betriebsmethoden oder die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstehen.
6. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schwierigkeiten, die beim Wiederverkauf oder der Verwendung im Ausland aufgrund der Bestimmungen des Landes, in dem das Produkt verkauft wurde, auftreten können.

Wenn es notwendig ist, die Garantie in Anspruch zu nehmen, geben Sie bitte folgende Daten an:

1. Produktname
2. Kaufdatum (muss eine Kaufbeleg enthalten)
3. Detaillierte Beschreibung des Problems

**VERWENDUNG: DIE NICHTBEACHTUNG DER VERWENDUNGSWEISE DES PRODUKTS, DIE IN DIESER DOKUMENTATION BESCHRIEBEN IST, FÜHRT ZUM VERLUST DER GARANTIEBEDINGUNGEN.**